


Hoe correct te meten


- Meet de lengte van de arm met gestrekte arm en meet de omvang bij voorkeur als de arm oedeemvrij is
- Zorg dat de gemeten maten behouden blijven, om een goede pasvorm van het compressieverband te waarborgen

Het circaid juxtafit essential armverband wordt gedragen vanaf de pols tot aan de oksel. Het armverband heeft een schuine afwerking aan de laterale zijde en een 10° bocht bij de elleboog. Het armverband wordt geleverd met een circaid cover up (indien er geen kleur wordt geselecteerd dan wordt er een cover up in de kleur zwart geleverd).

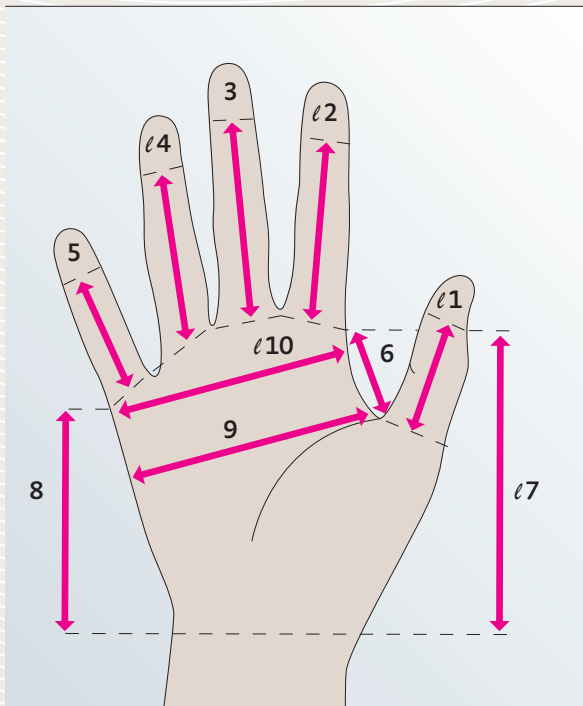

Lengtematen

- **Meting l1 – l5**
Lengte van de vinger vanaf eerste knokkel tot aan basis vingers
- **Meting l6**
Lengte vanaf basis wijsvinger tot aan basis duim
- **Meting l7**
Lengte vanaf basis wijsvinger (hetzelfde als l6) tot aan de pols
- **Meting l8**
Lengte vanaf de plooi tussen ringvinger en pink tot aan de pols
- **Meting l9**
Breedte van de handpalm ter hoogte van basis duim
- **Meting l10**
Breedte van de handpalm ter hoogte van basis pink

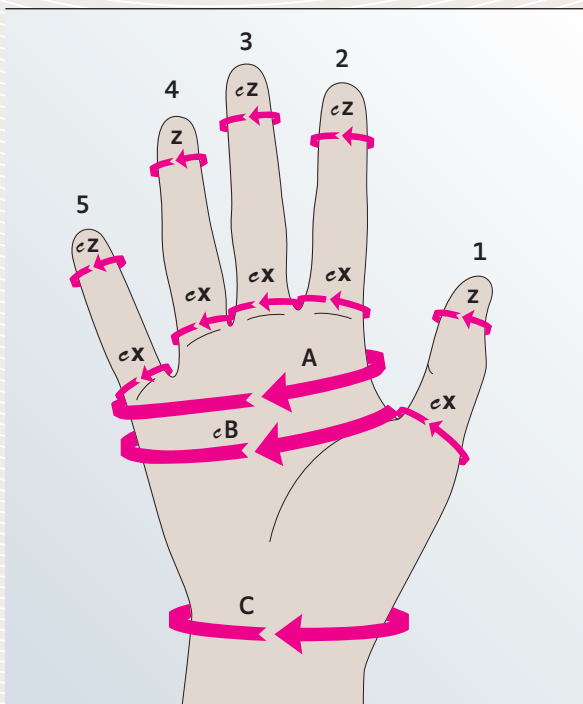

Omvangmaten

Niet onder spanning meten.

- **Meting 1cZ – 5cZ**
De omvang waar de handschoen eindigt, het Distale Interfalangeale gewricht (DIP-gewricht)
- **Meting 1cX – 5cX**
De omtrek van elke vinger in het proximale interfalangeale gewricht (PIP) (het gewricht tussen het voorlaatste en het basiskootje)
- **Meting cA**
Omvang van de handpalm bij de basis van de pink
- **Meting cB**
Omvang van de handpalm bij de basis van de duim
- **Meting cC**
Omvang van de pols